



wissner-
bosserhoff

image

Meubilair voor levenskwaliteit



„ Het gemiddelde geeft de
wereld haar duurzaamheid,
het buitengewone haar waarde.“

Oscar Wilde

De medische kennis groeit continu, humane microtechnieken maken behoedzame ingrepen mogelijk, nieuw ontwikkelde medicijnen helpen het genezingsproces. Vanwege de buitengewone situatie waarin zieke mensen zich bevinden, moeten verblijven in ziekenhuizen voor patiënten zo aangenaam en behaaglijk mogelijk worden gemaakt. Hiervoor is in de afgelopen decennia veel moeite gedaan. Ook wissner-bosserhoff levert hieraan een bijdrage, waarbij de patiënt en het verplegend personeel in gelijke mate centraal worden gesteld. Daarom rust wissner-bosserhoff meubilair met comfortabele functionaliteit uit en verenigt deze tegelijkertijd met een weldadig design. Het resultaat: image. Een ziekenhuisbed dat zowel voldoet aan de allerhoogste vakkundige eisen en tegelijkertijd rekening houdt met menselijke wensen.

image





01



Vorige pagina Het ziekenhuisbed image met nachtkastje stylo C3 straalt behaaglijkheid uit.

01 De comfortabel en snel bereikbare bedieningssatelliet vergemakkelijkt de bedpositionering voor zowel patiënt als verpleger. De effectieve beduitstappositie ondersteunt een tijdsbesparende mobilisering.

02 De mobi-lift geeft de patiënt steun tijdens het opstaan en biedt door middel van een geïntegreerde functietoets de mogelijkheid om de bedhoogte aan het opstaan aan te passen.

Rechterkant Het nachtkastje stylo C2K verbluft door zijn innerlijke waarden.



02

„Het is fantastisch, een belangrijk mens te zijn, maar het is fantastischer, menselijk te zijn.“

William Penn Adair "Will" Rogers

image

Het ziekenhuisbed image straalt met zijn warme houten oppervlakken een gezellige, vriendelijke sfeer uit. De combinatie met het nachtkastje stylo C2K garandeert een uniform, behaaglijk uiterlijk. In functionele zin bekoort image door uitstekende kenmerken. Uitgerust met een automatische contoureninstelling in combinatie met een dubbele autoregressie van de rug- en dijbeensteun kan de patiënt behoedzaam en comfortabel een rechte zitpositie innemen. De zijsponden overtuigen door flexibel instelbare en doorlopende buizen. Bijzonder praktisch: de zijsponden kunnen met slechts één hand worden bediend en bieden bescherming bij het gebruik van alle soorten matrassen. Individueel comfort: het nachtkastje stylo C2K is uitgerust met een geïntegreerde koelkast.



image





01



02

Vorige pagina Hotelsfeer in de ziekenkamer? image maakt het mogelijk en draagt hierdoor positief bij tot het herstel.

01 Het nachtlucht maakt een veilige oriëntatie 's nachts mogelijk.

02 Het bijpassende nachtkastje stylo C3K met geïntegreerde koelkast onderstreept de comfortbehoefte van de patiënt.

Rechterkant Rond gebogen hoofdbeugels omgeven het bed harmonisch.



„Kwaliteit is geen toeval; zij is altijd het resultaat van ingespannen denken.“

John Ruskin

Het meubilair van peer calavados gecombineerd met mat aluminium geeft deze ziekenkamer een hoogwaardige, elegante sfeer. Een zorgvuldige verwerking en uitgelezen materialen kenmerken het behaaglijke uiterlijk. De maximale functies van image houden zich decent op de achtergrond en kunnen gelijktijdig onmiddellijk worden opgeroepen. image houdt net zo rekening met de behoeftes van het verplegend personeel als met die van de patiënt.

image



image



ziekenhuisbed image

Uitgebreide functies vergemakkelijken de dagelijkse omgang.

01 Zijsponden

Bescherming en een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden bieden de zijspanden van image:

- Volledige veiligheid
- Veilig gebruik van alle gangbare matrassen en wisseldruksystemen tot een hoogte van 37 cm
- Veilig gebruik van fixeersystemen volgens het BfArM** (federaal instituut voor medicijnen en medische producten)
- In 5 posities hoogteverstelbaar
- Volledig neerlaatbaar onder het ligvlak voor onbeperkte toegang naar de patiënt en een permanente patiëntentransfer
- Telescoopbuizen maken het gebruik ook in combinatie met de bedverlenging / bedverkorting mogelijk
- Volledige bescherming, zelfs in automatische contourenpositie

11 Supervisor

- Kan bij niet-gebruik ruimtebesparend in het beddengoedvak worden opgeborgen
- Maakt het blokkeren van afzonderlijke functietoetsen mogelijk
- Beschikt over een STOP-toets voor noodgevallen om alle bedverstellingen onmiddellijk te stoppen
- Maakt de snelle instelling van de volgende, voorgeprogrammeerde lig- en noodgevallenposities mogelijk:
 - Trendelenburg
 - cardiac chair
 - onderzoekspositie
 - beduistappositie
 - CPR
- Dubbele beveiliging dankzij de GO-veiligheidstoets

10 Verrijd- en rembaarheid

Via de centrale rem zijn alle rollen vanuit beide bedzijdes per voetpedaal rembaar:

- Goede verrijdbaarheid dankzij 150 mm rollen met richtingvastzetters voor rechtuitrijden
- Rugsparende bediening van de centrale rem door kiphefboom met drie functies:
 - rood beneden = alle rollen zijn geremd
 - horizontaal = alle rollen zijn vrij
 - groen beneden = de richtingsrol is geactiveerd
- Eenvoudig en rugsparend manoeuvreren op lange gangen en in smalle ruimtes door 5de rol*

09 Voetschakelaar*

De voetschakelaar maakt een rugsparende, handvrije instelling van de volgende posities mogelijk:

- Onderzoekspositie: bed in hoogste positie, ligvlak horizontaal
- Hoogteverstelling van het bed
- De beschermbeugel verhindert een onbedoelde bediening van de functietoetsen
- Blokkeermogelijkheid op de supervisor

02 Handbediening

image-bedden onderscheiden zich door een eenvoudige bediening en veiligheid:

- Overzichtelijke en ergonomische handschakelaar
- Voor het verstellen van de rug- en dijbeensteun, automatische contoureninstelling alsmede hoogteverstelling van het bed;
- Dubbele beveiliging dankzij de GO-veiligheidstoets

03 Ligvlak

Het ergonomische ligvlak zorgt voor gezond liggen:

- Dubbele autoregressie van rug- (11 cm) en beensteun (7 cm) voor de decubitusprofylaxis
- Vrije matraskeuze in diverse lengtes en tot een hoogte van 37 cm
- Afneembare onderdelen zorgen voor een eenvoudige reiniging
- Geïntegreerde bedverlenging / bedverkorting van telkens + 8 / + 17 cm
- Geïntegreerde verlenging van de onderbeensteun
- Snelle toegang van boven tot de aandrijving verkort onderhouds- en servicewerkzaamheden

04 Bedieningssatelliet*

- De flexibele bedieningssatelliet is achter de rugsteun aangebracht en dus altijd goed bereikbaar
- Optimaal kabelmanagement
- Voor het verstellen van de rug- en dijbeensteun, het instellen van de beduistappositie en hoogteverstelling van het bed
- Dubbele beveiliging dankzij de GO-veiligheidstoets

05 Mobi-lift*

- Geeft steun tijdens de mobilisering;
- Geïntegreerde functietoets voor de hoogteverstelling van het bed maakt de flexibele aanpassing van de bedhoogte aan het opstaan mogelijk
- Vermindert het risico op vallen zonder beperking van de bewegingsvrijheid
- Parkeerpositie onder het ligvlak

06 Accessoirerail "Flexirail"

De accessoirerail kan onder het ligvlak worden weggeklapt.

- Geen risico op blijven hangen met drainages enz. tijdens het transport
- Directe toegang tot het bed

07 Heftechnologie


image-bedden onderscheiden zich door een stabiele hef kolomconstructie:

- Hoogteverstelling van 39 tot 77 cm (met 150 mm Integral-rollen)
- Veilige werklust 230 kg
- Eenvoudige reiniging dankzij de gladde oppervlakken en een compleet gesloten systeem
- Beschermingsgraad IP 54
- Verstelkracht van 2000 N
- Door de beneden geïntegreerde aandrijvingen verminderde elektrosmogbelasting voor de patiënt
- Kras- en stootvast, geanodiseerd aluminium
- Bedrijfsinterne technologie sinds 1999
- Snelle levering van reserveonderdelen

08 Functie nachtlucht*

Optioneel kan een nachtlucht worden geïntegreerd

- Beter oriëntatie 's nachts
- Meer veiligheid voor de patiënt
- Eenvoudige controle van de netaansluiting

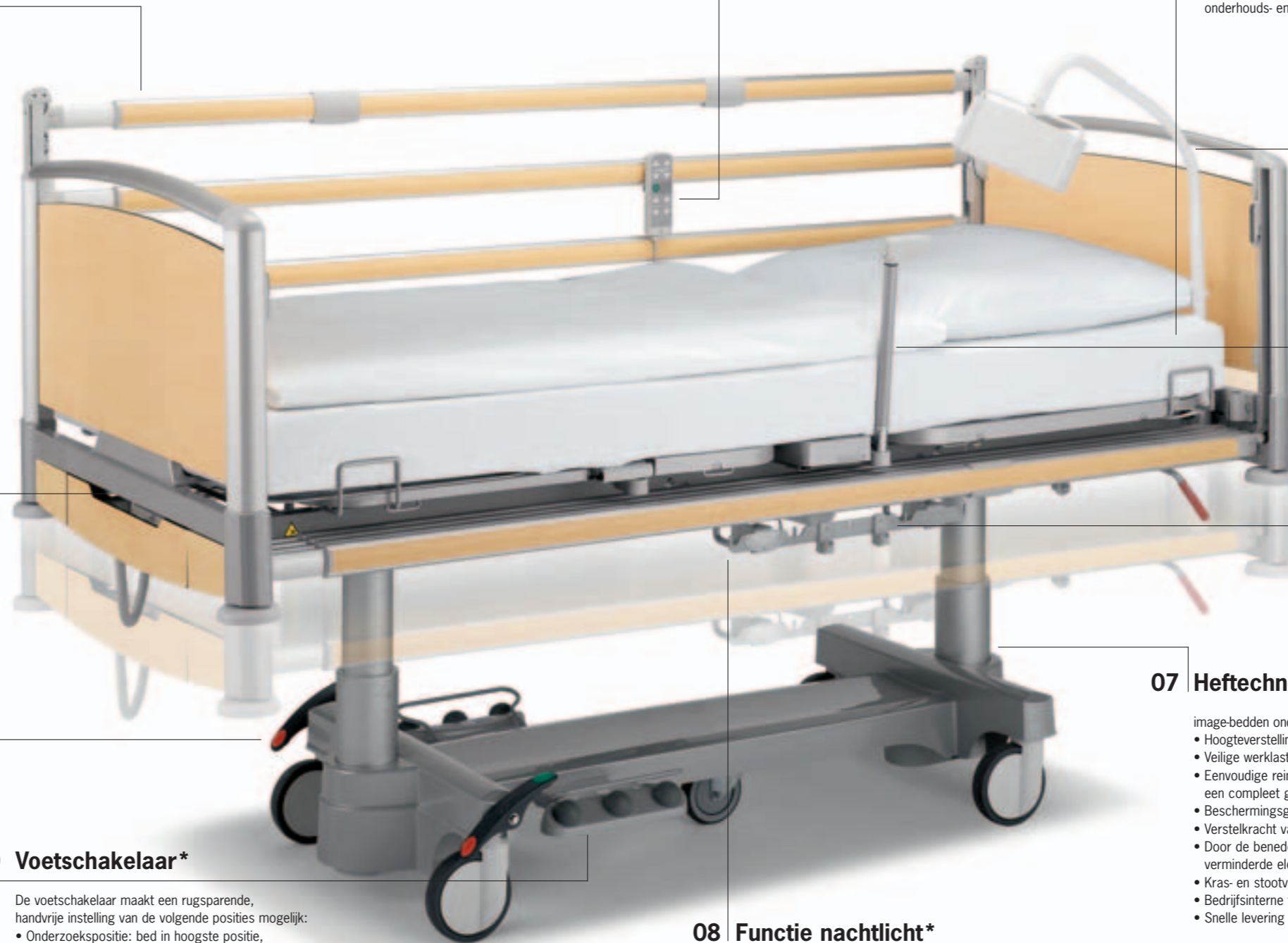

Het kwaliteits- en veiligheidsmanagement werkt volgens de bepalingen DIN EN ISO 9001:2008 en DIN EN ISO 13485:2003 + AC:2007, onze bedden dragen het CE-kenmerk en zijn als medische producten volgens de actuele ziekenhuisbednorm getest.

mobiliteit en autonomie


Mobilisering met bedienings-satelliet De aan het hoofdeinde geïnstalleerde bedienings-satelliet bevindt zich altijd binnen handbereik. Met de voorgeprogrammeerde **uitstappositie** beweegt het bed helemaal naar beneden en de rugsteun komt overeind. De patiënt krijgt snel contact met de grond en heeft hierdoor een geruststellende veiligheid. Zittend op de rand van het bed kan hij zich aan de zijspanden vasthouden en zich oprichten.



Mobilisering met mobi-lift De mobi-lift is uitgerust met een geïntegreerde functietoets voor de hoogtereverstelling van het bed. Zittend op de bedrand vindt de patiënt zowel door de zijspanden als door de mobi-lift steun en kan de bedhoogte aan zijn opstaan aanpassen. De lichamelijke inspanning voor het verplegend personeel wordt verminderd.



Mobilisering met mobi-lift en mobi-stick Mobi-lift (met hoogtereverstelling) en mobi-stick (zonder hoogtereverstelling) vormen de perfecte hulp tijdens het opstaan. Voor het ontlasten van het personeel kan de patiënt zijn gewicht op de handgrepen verplaatsen. Door de via de mobi-lift aangepaste bedhoogte wordt de patiënt door het bed ondersteund tot hij bijna recht staat. Bij niet-gebruik kunnen beide handgrepen onder het ligvlak worden ondergebracht.

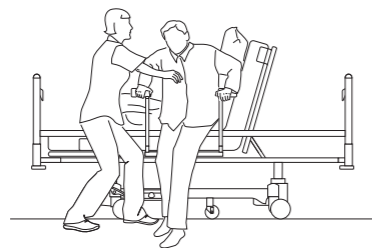

De voetschakelaar vergemakkelijkt het dagelijkse werk. Naast de bedhoogte kan ook de onderzoekspositie worden ingesteld en maakt de rugsparende verpleeginstelling mogelijk zonder de handen te gebruiken. Dankzij de veiligheidsbeugel alsmede de mogelijke blokkering via de supervisor worden functies alleen dan geactiveerd als deze nodig zijn.



Activiteit en mobiliteit in het dagelijks ziekenhuisleven verkrijgen en bevorderen heeft een positieve uitwerking op het herstelproces. De patiënten zijn meer tevreden en behouden een stuk zelfstandigheid bij het aankunnen van alledaagse taken. Het ziekenhuisbed image beschikt over veelzijdige functionaliteiten die de mobiliteit ondersteunen. Lage uitstaphoogtes voorkomen dat de patiënt kan vallen, door de gebruiksvriendelijke satelliet kan de patiënt op elk moment zijn zit-/ligpositie veranderen, de mobi-lift en mobi-stick zijn het perfecte hulpmiddel om zelfstandig het bed te kunnen verlaten. Ontlastingen voor de patiënt en het verplegend personeel.


instelling en comfort




Met de GO-veiligheidstoets wordt rekening gehouden met het principe van de dubbele beveiliging. Deze voorkomt een ongecontroleerde activering van functies doordat bijvoorbeeld per ongeluk op een toets wordt gedrukt of door elektrische foutieve functies. Zonder bediening van de GO-veiligheidstoets zijn de bedieningselementen niet actief en kunnen de motoren van het bed niet worden gestart. De toetsen blijven 3 minuten na beëindiging van de laatste positionering actief. Bij de volgende positionering dient dan opnieuw de GO-veiligheidstoets te worden ingedrukt.

De perfecte combinatie van comfort en rendabiliteit: het voetende kan worden weggenomen en in de geleidingen van de mobi-stick worden geschoven. Zo kan het als tafelvervanging om te eten of lezen worden gebruikt.



De dubbele autoregressie van de rugsteun met 11 cm volgens DBfK-aanbeveling (DBfK = Duitse beroepsorganisatie voor verplegende beroepen) en van de beensteun met 7 cm zorgt voor een drukontlasting in het bekkengebied. Wrijvings- en schuifkrachten tijdens het verstellen van de rug- en dijbeensteun worden geminimaliseerd. Hierdoor wordt het decubitusrisico duidelijk gereduceerd. De dubbele autoregressie voorkomt aanvullend de positieverandering van de patiënt op het matras. In combinatie met de opstahulp mobi-lift is bij image een papagaai dus niet meer nodig.

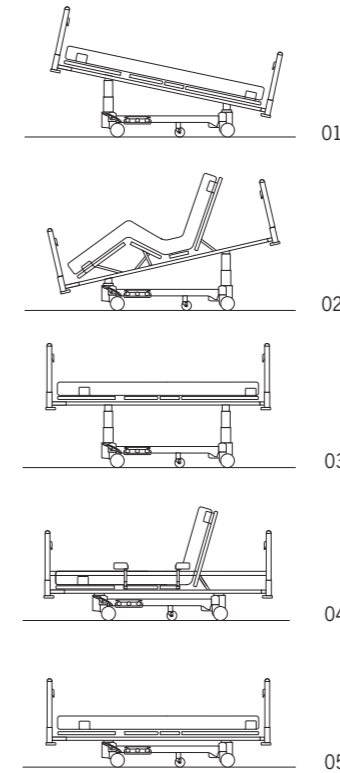

De supervisor maakt het voor het verplegend personeel mogelijk om de voorgeprogrammeerde noodgevallen- en ligposities Trendelenburg (01), cardiac chair (02), onderzoekspositie (03), beduistappositie (04) en CPR (05) snel te kunnen instellen. Aanvullend bestaat de mogelijkheid om de voor de patiënt toegankelijke verstelmogelijkheden van het bed te blokkeren. Een STOP-toets voor noodgevallen garandeert dat alle ongewenste bedpositioneringen onmiddellijk worden gestopt. Met behulp van de LED-indicatie kan de accucapaciteit worden gecontroleerd. Tijdens het liggen kan de intelligente accu door middel van een toetsencombinatie via de supervisor op non-actief worden geschakeld.

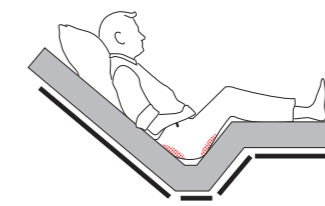

Standaard ligvlak

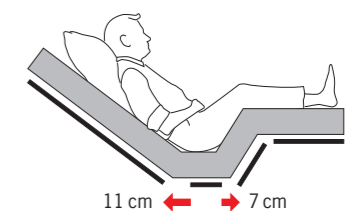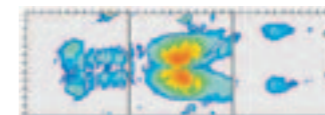

Dubbele autoregressie



veiligheid en preventie

O-positie

- Buizen volledig onder het ligvlak verzonken
- Goede toegang tot accessoires
- Geen obstakel tijdens het zitten of de patiënttransfer
- Geen beschadiging van de deurlijst tijdens het transport

Mobiliseringspositie

- Doorlopende greeplijst voor ondersteuning tijdens het opstaan of voor de 135° ligpositie
- Veilig houvast tijdens het zitten op de bedrand

Verpleegpositie

- Combinatie van veiligheid en een goede toegang tot de patiënt voor de dagelijkse verpleging
- Vrij zicht en eenvoudigere communicatie

Veiligheidspositie

- Volledige bescherming voor het welzijn van de patiënt bij een veiligheidshoogte van 45 cm
- Gebruik van universele matrassen en profylaxematrassen tot een hoogte van 23 cm

Therapiepositie

- Veiliger gaat niet: Hoogste veiligheidsniveau op een hoogte van 59 cm
- Gebruik van therapeutische matrassen tot een hoogte van 37 cm
- Volledige bescherming ook bij omhoog gezette ligvlak elementen (automatische contourenbeveiliging)

Het zijspondenconcept van image is precies zo flexibel als het dagelijkse ziekenhuisleven dit vereist. Met vier doorlopende buizen is de veiligheid van de patiënt op verschillende niveaus op elk moment gegarandeerd. Door de integratie van de veiligheidsbuizen zijn deze onmiddellijk beschikbaar als ze nodig zijn. Bovendien is dit beschermende systeem zo ontworpen dat het met alle matrassen kan worden gebruikt. De telescopeerbare buizen maken het flexibele gebruik in

samenspel met de bedverlenging mogelijk. Vanuit de hoofdbeugels zijn de buizen verplaatsbaar en maken zo de therapiepositie mogelijk, welke de patiënt met matrassen tot een hoogte van 37 cm of in de automatische contourenpositie beveiligd. Als er geen beveiliging noodzakelijk is, kunnen de buizen die in het hoofd- en voeteinde zijn verankerd, eenvoudig onder het ligvlak worden verzonken.



hygiëne en reiniging


Rendabiliteit. Het ziekenhuisbed image krijgt ook qua reiniging en hygiëne de allerhoogste cijfers van het ziekenhuispersoneel. Het doordachte materiaalgebruik alsmede de vormgeving van het ligvlak maken rondom een snelle en efficiënte reiniging mogelijk. Dit maakt image economisch en helpt om het verplegend personeel snel weer daar in te zetten, waar het door de patiënt dringend benodigd wordt.

Het onderhoudsarme ligvlak van image is van glad kunststof. Ingewerkte openingen garanderen een goede ventilatie van de matras, laten vloeistoffen wegvloeien en geven opgehoopte vochtigheid geen kans.



image maakt een snelle desinfectering mogelijk. Waterbeschermde technische eenheden zoals de hefkolom zijn royaal ommanteld. De reiniging is dus eenvoudig mogelijk.


De stabiele deklagen van het ligvlak kunnen afzonderlijk worden weggenomen. Dit garandeert dat deze eenvoudig kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd.

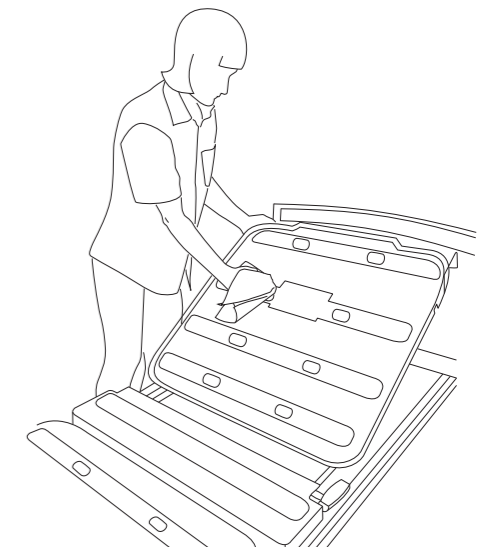

mobiliteit en stabiliteit


Verpleegontlasting

image beschikt optioneel over een vijfde rol. Deze maakt het mogelijk dat het bed ter plekke kan worden gedraaid. Door de kleine draaicirkel kan image door slechts één persoon gemakkelijk en krachtbesparend vanuit het hoofd- of voeteinde worden verreden. Zonder tijdrovend rangersen beheerst image het inslaan in nauwe gangen en kleine ziekenkamers voorbeeldig.

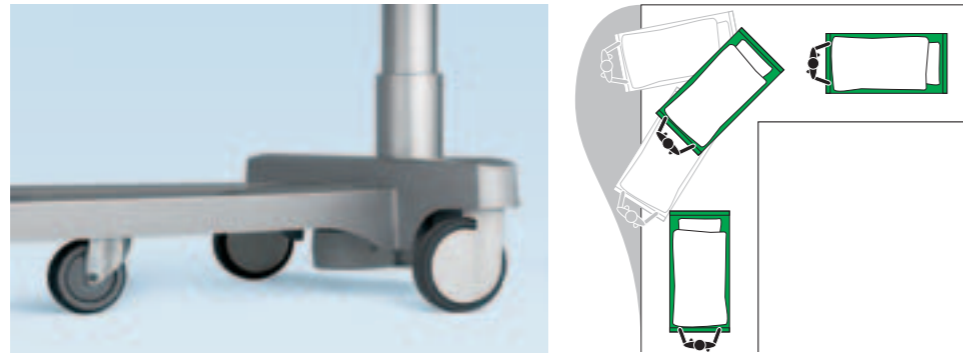

Het bed is uitgerust met een centrale vastzetter.

Het personeel bedient deze rem met de voet en kan het bed zo moeiteloos vast- en loszetten. Bij ingestoken netstekker en geloste rem klinkt een akoestisch gevarensignaal (optie) dat op het risico van vallen of tijdens het transport op het uittrekken van de netkabel uit de wand attent maakt.

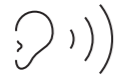


Zieke mensen zijn vaak beperkt in hun mobiliteit. Daarom is image een bed dat in staat is om zich aan te passen en gebruiksvriendelijk gebruikt kan worden. Het moeiteloze transport van de patiënt in het bed vergemakkelijkt het personeelsintensieve en lichamelijk veeleisende werk van het verplegend personeel. En krachtbesparende functies dragen op doorslaggevende wijze tot de ontlasting bij.

Met de bedverlenging kunnen ook lange mensen optimaal en comfortabel worden verzorgd. De variabele bedlengte maakt het gebruik van reeds aanwezige matrassen mogelijk.


Stabiliteit en belastbaarheid

Met een verstelkracht van 2000 N (ca. 200 kg) en meer dan 150.000 praktijkproeven sinds 1999 zijn de hefkolommen stevig en stabiel. De in elkaar grijpende losse elementen garanderen een hoge laterale stabiliteit. Een statische belastbaarheid van 400 kg en een veilige werklust van 230 kg in de hoogste positie met behoud van alle verstelmogelijkheden zijn voor de hefkolommen geen probleem. De beneden gemonteerde aandrijvingen reduceren de elektromagnetische belasting. Het oppervlak van geanodiseerd aluminium garandeert het weerstandsvermogen tegen beschadigingen.

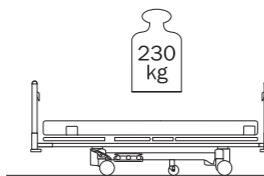

assortimentsoverzicht


Afmetingen

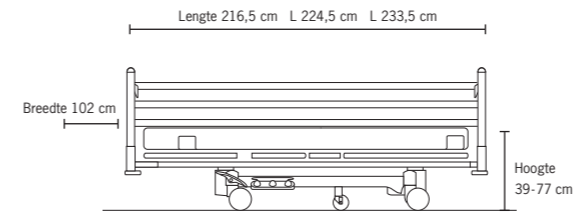


Doorlopende zijsponden met centrale activering
Afmetingen matras bij een bedlengte van 216,5 cm: 200 x 86 cm

Extra's

Basisuitrusting

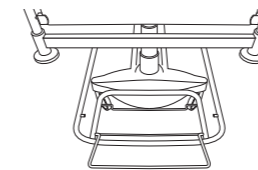


Dekenrekje

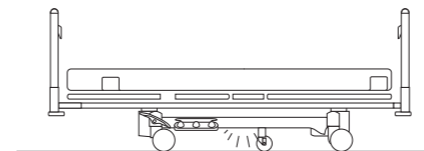

Opties


Nachtlicht

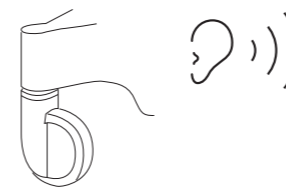

Remalarm

Wielen


Basisuitrusting

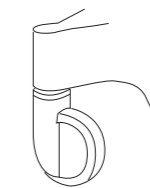

Lichtlopende rol Tente Integral


Diameter 150 mm

Opties

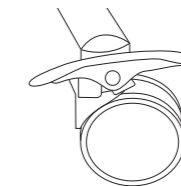


Dubbele looprol Tente

Diameter 150 mm

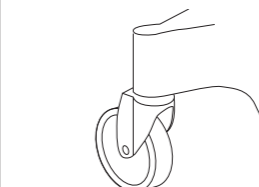

Tente Concept wiel

Diameter 150 mm

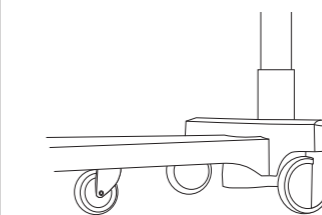



5de rol

Diameter 125 mm

Bedieningselementen


Basisuitrusting

Handschakelaar
(in optie verkrijgbaar met een plug & play aansluiting)

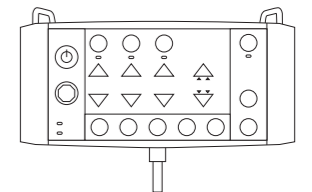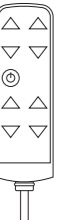


Supervisor


Opties

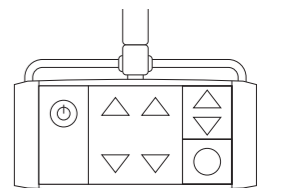

Bedieningssatelliet

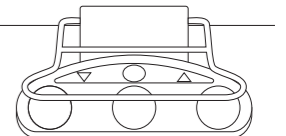

Voetschakelaar

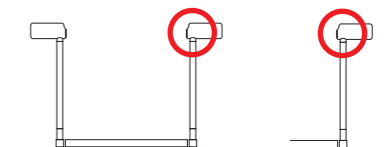

Mobi-sticks + mobi-lift

telkens aan beide kanten

Mobi-lift

aan beide kanten

E 009 Esdoorn wit
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

H 019 Licht beuken
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

F 011 Vruchtboom amber
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

Z 002 Zebra mokka
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

O 30 Blanco Especial
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

G 044 Dolfjngrijs
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

C 017 Eierschaal
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

P 043 Pomelo
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

N 001 Nectarine
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

K 001 Kiwi
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

A 014 Aquamarijn
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel

B 048 Osloblauw
Decor hoofd en voeteinde, zijdeel



Concept en vormgeving
sieger design
Fotografie
Studio Casa
Druk
msp druck und medien GmbH
Oplage
06/2009, Rev.2, art.-nr.: 97-0309
wissner-bosserhoff
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.
Technische wijzigingen voorbehouden.



wissner- bosserhoff

Meubilair voor levenskwaliteit

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49 (0)23 77 784-0
Fax: +49 (0)23 77 784-163
E-mail: info@wi-bo.de

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42
NL-3316 KA Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 652 18 50
Fax: +31 (0)78 652 18 55
e-mail: info.nl@wi-bo.de

wissner-bosserhoff N.V. Belgium S.A.

Egide Walschaertsstraat 15/15
B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41
Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be

www.wi-bo.be

